

# DYNACELL

Wechseldrucksystem




## 1. EINFÜHRUNG

Dieses Handbuch sollte bei der Erstinstallation und als spätere Referenz verwendet werden.


## 2. BESCHREIBUNG Des Produkts

### 2.1 KOMPRESSOR

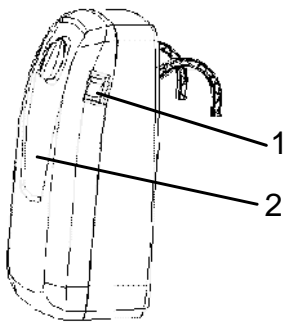

#### VORDERSEITE:

- 1. Schalter
- 2. Frontplatte

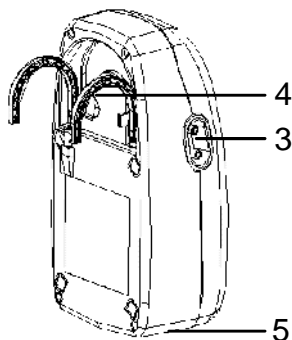

#### RÜCKSEITE:

- 3. Luftauslass
- 4. Bügel
- 5. Stromkabel


### 2.2 Schutzabdeckung

#### 1. Druckregler.

Er regelt den Druckluftauslass. Wenn Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich der Druck. Wenn Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, verringert sich der Druck. Bitte fragen Sie Ihren Arzt nach der geeigneten Einstellung


#### 2. Hauptschalter

Zum Ein-/ Ausschalten des Kompressors. Es leuchtet eine grüne Lampe auf

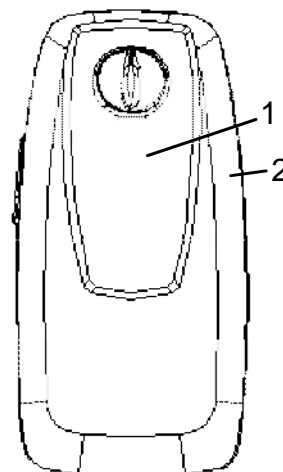


### 3. INSTALLATION

Packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie die Komponenten auf mögliche Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Sollten Sie jegliche Schäden bemerken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler

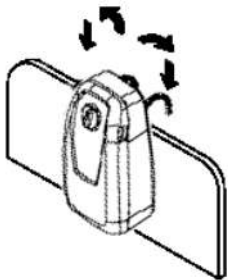

1. Legen Sie die Matratze auf das Bett. Bitte achten Sie auf das Fußende des Bettes

**⚠ WICHTIG:** DOMUS 2 ist ein Matratzenauflagesystem, so muss es einen Schaum oder eine Matratze unter bei der Verwendung.

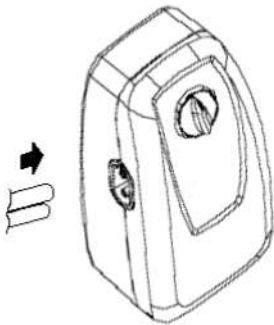

2. Hängen Sie den Kompressor am Geländer oder am Fußteil des Bettes ein, oder legen Sie ihn auf eine ebene Fläche

3. Verbinden Sie den Luftaus-/einlass der Matratze mit dem Kompressor.

**⚠ WICHTIG** Versichern Sie sich, dass die Luftschläuche nicht unter der Matratze verborgen oder geknickt sind.

4. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromanschluss

**⚠ WICHTIG** 1. Versichern Sie sich, dass der Kompressor für die Stromspannung vor Ort geeignet ist.

2. Der Stecker kann ebenfalls zum Ausschalten dienen

**⚠ ACHTUNG** : Der Kompressor darf nur mit der vom Hersteller empfohlenen Matratze verwendet werden. Verwenden Sie ihn zu keinem anderen Zweck

5. Schalten Sie den Schalter ein, der rechts vom Kompressor liegt.

#### Verschiedene Tipps zur Installation:

Nach der Installation müssen die restlichen Teile des Kabels, die noch offen liegen könnten, ordentlich aufgewickelt werden, um zu vermeiden, dass man darüber stolpert. Das Gerät muss stabil und an einem für den Nutzer oder den Arzt leicht zugänglichen Ort aufgestellt werden.

## 4. FUNKTIONSWEISE



**WICHTIG** -Lesen Sie die Hinweise zur Funktionsweise vor dem Gebrauch durch.

### 4.1 Allgemeine Funktionsweise

1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
2. Der Kompressor beginnt Luft in die Matratze zu pmpen



**WICHTIG:** Immer wenn Sie die Matratze aufpumpen möchten, ist es empfehlenswert, den Druckregler auf den Höchststand einzustellen, um ein schnelleres Aufpumpen zu erreichen. Sobald die Matratze aufgepumpt ist, kann der Benutzer die Festigkeit den Druck derselben regeln.

### 4.2 CPR

Im Notfall, und falls ein Atemstillstand eintritt, öffnen Sie unverzüglich das CPR-Ventil der Matratze. Die CPR-Ventile befinden sich an der linken unteren Seite der Matratze. (Nur verfügbar bei Matratzen mit Luftzellen über 6,35 cm). Für eine schnellere Entleerung können auch am Kompressor angeschlossenen Luftschläuche abgetrennt werden, doch nur bei Modellen, die mit "quick connectors" (Steckverbindungen) ausgestattet sind.

## 5. REINIGUNG

Es ist wichtig, die Reinigungsprozedur zu befolgen, bevor das Gerät am menschlichen Körper angewandt wird, da der Patient und/oder der Arzt sich sonst anstecken könnten.

Wischen Sie den Kompressor mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel ab und halten Sie ihn frei von Staub. Wenn Sie ein anderes Reinigungsmittel verwenden, wählen Sie eines, das keine chemischen Auswirkungen auf die Oberfläche des Plastikgehäuse des Kompressors hat.



**ACHTUNG** - Tauchen Sie den Kompressor nicht in Flüssigkeit und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

Wischen Sie die Matratze mit einem feuchten Tuch mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab. Der Überzug kann ebenfalls gewaschen werden, nämlich mit in Wasser aufgelöstem Natriumhypochlorit. Alle Teile müssen vor ihrer Verwendung vollständig an der Luft trocknen.



**ACHTUNG-** Verwenden Sie keine Produkte, die auf Alkohol / Phenolkomponenten basieren.



**ACHTUNG-** Lassen Sie die Matratze nach der Reinigung an der Luft trocknen, ohne sie jedoch zu lange direktem Sonnenlicht auszusetzen.

## 6. LAGERUNG

### Für Matratze mit Luftzellen:

1. Um die Matratze zu lagern, breiten Sie sie der Länge nach und mit der Oberseite nach unten aus.
2. Rollen Sie sie vom Kopfteil bis zum anderen Ende der Matratze mit geöffnetem CPR-Ventil ein.
3. Umwickeln Sie die Matratze nach dem Einrollen mit dem, der sich am unteren Ende befindet, um ein Entrollen zu vermeiden.
4. Falten Sie das Kissen in der ursprünglichen Methode.

## 7. INSTANDHALTUNG

1. Allgemein: Versichern Sie sich, dass sich das Kabel und der Stecker in gutem Zustand befinden.
2. Überprüfen Sie den Zustand des Überzugs. Versichern Sie sich, dass der Überzug zusammen mit den Schläuchen korrekt gelagert ist.
3. Überprüfen Sie den Luftstrom der Steckverbindungen. Modus "alternierende Funktion" muss der Luftstrom zwischen den beiden Verbindungen alternieren.
4. Versichern Sie sich, dass die Luftauslässe nicht defekt oder beschädigt sind. Um sie auszutauschen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das System erworben haben.

476008-0000 V1.0



# DYNACELL

Wechseldrucksystem

The APEX logo consists of the word "APEX" in a bold, red, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a diagonal slash through it.

Care for a Healthy Life

[www.apexmedicalcorp.co.uk](http://www.apexmedicalcorp.co.uk)

The SUNMED logo features the word "SUNMED" in a bold, blue, sans-serif font. A red swoosh underline starts under the 'S' and curves under the 'M'.

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH  
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf  
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien  
Internet: [www.sunmed.at](http://www.sunmed.at) - Email: [office@sunmed.at](mailto:office@sunmed.at)  
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464