

SUNMED R 3100

Rentabel - Comfortabel - Wirksam!



✓ Einfachstes Handling, Logiksteuerung

✓ Matratzenersatz durch geschlossenes Lakensystem

✓ Wirksame Dekubitustherapie bis Grad 2

✓ Kombinierbar mit Lehnsessel und Sitzkissen

✓ Sicherheit durch flache Bauweise (Seitengitterschutz!)

SUNMED R 3100

Rentabel - Comfortabel - Wirksam!

Steuereinheit



Steuereinheit

Die Steuereinheit arbeitet mit einem 9,5-Minuten-Zyklus und bietet so einen effizienten Wechseldruck. Die Drucksteuerung ist manuell einstellbar und wird selbstverständlich akustisch und optisch drucküberwacht.

Die gesamte Konstruktion ist leichtgewichtig und einfach zu installieren.

CPR

Durch Trennen des Luftschlauches von der Steuereinheit wird die Luft innerhalb weniger Sekunden aus dem System gepresst. Die Reanimation kann sofort gestartet werden.

Matratze

20 großzellige Luftkammern reduzieren den Auflagedruck. Im unteren Bereich des Überzuges befindet sich eine 5cm hohe, viskoelastische Schaumstoffmatratze für den Transport der Patienten. Die Gesamthöhe der Matratze beträgt maximal 18 cm, wodurch eine sichere Lagerung der Patienten und eine 100%ige Nutzung der Seitengitter gewährleistet wird.

Der bi-elastische Stretchbezug ist atmungsaktiv, flüssigkeits- und bakterien dicht und kann mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln bearbeitet werden.

Die Oberfläche kann mit jedem herkömmlichen Flächendesinfektionsmittel bearbeitet werden.

Lehnsessel und Sitzkissen

Das R 3100 Steuergerät kann mit einem Wechseldruck-Sitzkissen oder einer Lehnsesselauflage (ebenfalls mit Wechseldruck) kombiniert werden. Dadurch können die Patienten auch während der Mobilisierung druckentlastet therapiert werden.

Luftkissen



Lehnsessel und Sitzkissen



Technische Daten:

Pumpe	Spezifikation
Stromversorgung	AC230V, 50 Hz, 0,7A
Sicherungsstärke	T1A
Rauschpegel	NC30
Abmessungen (LxBxH)	30 cm x 19 cm x 11 cm
Sicherheitsstandards	IEC601/1 BSS724 Part 1

Matratze	Spezifikation
Abmessungen (LxBxH)	180 cm x 80 cm x 14 cm

Bestellnummer: R31-PA5000




Park House
Healthcare


SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2015 / SM-R31-15V01